

# Инструкция по применению

## изделий медицинских компрессионных

B.Well   
rehab

Серия MED

Компрессионный трикотаж B.Well rehab серии MED используется при хронической венозной недостаточности, сильных отеках ног, для профилактики тромбоза глубоких вен. Ассортимент компрессионного трикотажа B.Well rehab серии MED включает в себя: гольфы, чулки, колготки.

Ношение компрессионного трикотажа B.Well rehab способствует улучшению кровотока и уменьшению отеков ног. Механизм действия компрессионного трикотажа основан на распределенном (градуированном) давлении: максимальное давление в надлодыжечной области 22-29 мм рт. ст. (для мужских гольфов 23-32 мм рт. ст.) уменьшается в области голени, в области бедер компрессия минимальна. Компрессионный трикотаж оказывает воздействие на поверхностные вены и предотвращает развитие отеков.

Все изделия проходят тест Hatra, подтверждающий соответствие распределенного давления физиологическому.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

#### СЕРИЯ MED: II CLASS

22-29 мм рт. ст. для женского трикотажа;  
23-32 мм рт. ст. для мужского трикотажа

- ▶ Варикозная болезнь (телеангиэкзии; варикозно-расширенные вены)
- ▶ Варикотромбофлебит
- ▶ Компрессионная терапия после флегбосклерозирования и хирургических вмешательств на венах нижних конечностей
- ▶ Профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска

### СХЕМА НАДЕВАНИЯ

Рекомендуется надевать компрессионный трикотаж утром до появления отеков. Изделие рекомендуется надевать в перчатках, или же, прежде чем приступить к надеванию изделия, проверьте, чтобы ваши руки были подготовлены (отсутствие колец на пальцах, аккуратно подстриженные ногти, отсутствие заусенцев на пальцах), смажьте руки кремом.

1. Соберите изделие до пятки. Аккуратно натяните на ступню. Проверьте правильность расположения пятки.

2. Постепенно надевайте трикотажное изделие разглаживающими движениями



3. Аккуратно уберите складки при необходимости



4. Натяните изделие до талии (в том случае, если это колготки)



#### Расшифровка символов, применяемых на упаковке:



Знак соответствия.  
На продукцию оформлена декларация о соответствии



Сертификация CE



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами



Модель



Код партии



Производитель  
[www.bwell-swiss.ch](http://www.bwell-swiss.ch)

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для профилактики отеков следует носить компрессионный трикотаж в течение дня, если иное не рекомендовано врачом.

B.WELL  
SWISS  
CONTROLLED

# Инструкция по применению

## изделий медицинских компрессионных


**B.Well**   
rehab

Серия MED

### РАЗМЕРЫ


Чтобы облегчить и упростить подбор необходимого размера специалисты B.Well Swiss разработали росто-весовую таблицу размеров, по которой можно в большинстве случаев подобрать правильный размер.

В ситуациях, когда невозможно воспользоваться данной таблицей, а также в пограничных случаях рекомендуется для точного выбора использовать таблицу подбора размеров, основанную на измерениях. Такие измерения лучше проводить с утра, до появления отеков.

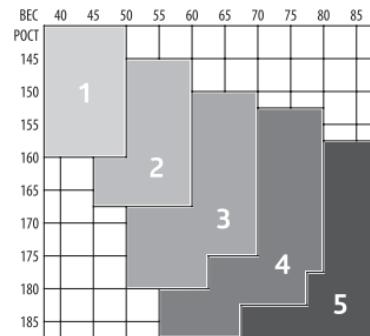

### ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ ДЛЯ ЖЕНСКИХ КОЛГОТОК, ЧУЛОК, ГОЛЬФОВ:

Измерение, сантиметры	Длина ступни	Окружность самой узкой части голени над лодыжками	Окружность голени чуть ниже подколенной ямки	Окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)	Длина от пола до измерения г
РАЗМЕР	a	b	d	g	A-G
1	до 23	до 22	до 28	до 50	до 72
2	23-24	20-23	30-37	45-58	до 75
3	24-26	23-26	33-40	49-63	до 78
4	26-27	26-29	35-43	53-68	до 81
5	27-28	29-32	39-49	56-72	до 83

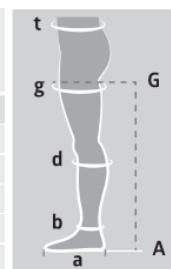

Маркировка размера на женских изделиях цветной полоской: 1 – голубой, 2 – зеленый, 3 – желтый, 4 – красный, 5 – синий  
Для колготок существуют ограничения по окружности талии (t): для 1-3 размера - до 90 см; для 4-5 размера - до 110 см.

### ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ПОДБОРА МУЖСКИХ ГОЛЬФОВ

Измерение, сантиметры	Длина ступни	Окружность самой узкой части голени над лодыжками	Окружность голени чуть ниже подколенной ямки
РАЗМЕР	a	b	d
2/S	26-26,5	до 21	до 28
3/M	27-28	21-25	34-42
4/L	29-29,5	25-29	37-46
5/XL	от 29,5	29-32	39-49

Маркировка размера на мужских изделиях цветной полоской:

2/S – голубой, 3/M – зеленый, 4/L – желтый, 5/XL – красный

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

-  Стирайте компрессионное изделие только вручную.
-  Температура стирки не должна превышать 30°С.
-  Нельзя использовать отбеливатели, химически активные добавки.
-  Запрещается гладить изделие.
-  Сушите компрессионное изделие в прохладном месте, избегая нагревательных приборов.

Стирайте трикотаж каждый день для сохранности медицинских свойств изделия.

Используйте в качестве моющих средств мыло или специальные шампуни для деликатных тканей.

Чтобы чулки «лучше держались»:

- не наносите кремы и лосьоны на ноги перед надеванием чулок;
- периодически протирайте силиконовые вставки на резинке спиртовым раствором.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 6 месяцев на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия).

**Гарантийными случаями не являются:**

- механические повреждения (включая случайные)
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием
- несанкционированные внесения изменений в конструкцию

**Гарантия не распространяется на упаковку.**

**ХРАНЕНИЕ:** в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** вместе с бытовыми отходами.

**Дата производства изделия:** указана на этикетке в номере партии «Lot»; последние шесть цифр обозначают год и месяц производства.

**Соответствие стандартам:** Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ.

Номер и дату РУсмотрите на стикере на упаковке;

Декларация о соответствии.